

zetClean®

# Wiper Bowl® Safe & Clean für Multitex® Wipes

ZVG®  
\* SINCE 1973 \*

## Wischn statt Sprühen

### mit Feuchttüchern aus dem Wiper Bowl® Safe & Clean Spendersystem

- Senkung des Desinfektionsmittelverbrauchs – die Anwendungslösung ist bis zu 4 Wochen (28 Tage) bzw. 6 Wochen (42 Tage) verwendbar
- Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln entsprechend VAH-Vorgaben bestätigt
- Hoher Hygienestandard bei der täglichen Desinfektion und Reinigung
- **Multitex® Wipes** bestehen aus **100 % PET\*** – so wird die Wirkstoffkonzentration der Desinfektionsmittel nahezu vollständig abgegeben
- Befüllbar mit den Flächendesinfektions- oder Reinigungssubstanzen Ihrer Wahl
- Einfache Entnahme der Einmaltücher durch Abriss-Perforation – so sind 60/100/110 Desinfektionsvorgänge möglich; durch den transparenten Deckel hat man die Füllmenge immer im Blick
- Wirksamer Schutz vor Austrocknung durch wiederverschließbaren Deckel mit Verschlusskappe
- Alle relevanten Inhaltsinformationen sicher im Blick durch beschriftbares Chargenetikett

\*PET hat ein geringes Adsorptionsverhalten der QAV (Quartäre Ammonium-Verbindungen) an den Fasern.



## Aufklappen, rausziehen, anwenden

**Wiper Bowl® Safe & Clean** ist die ökonomische und hygienische, wiederbefüllbare „Baukastenlösung“ zur gründlichen Wischdesinfektion und Reinigung sensibler Bereiche wie z. B. in Alten- und Pflegeheimen.

### Einfache Vorbereitung – sichere Anwendung

Tränken Sie die Tuchrolle im Eimer mit Ihren bewährten Flächendesinfektions- oder Reinigungssubstanzen und kennzeichnen das Etikett entsprechend. Dann verschließen Sie den Deckel und lassen die Flüssigkeit von den Tüchern aufsaugen. Bereits nach einigen Minuten Wartezeit ist Ihr **Wiper Bowl®** Spendersystem einsatzbereit.

Durch **das praktische Chargenetikett** haben Sie alle relevanten Inhaltsinformationen während der gesamten Einsatzzeit sicher im Blick. Danach lässt es sich rückstandsfrei entfernen.

**Wiper Bowl® Safe & Clean** Spendereimer sind mit den entsprechenden Informationen zur Arbeitsanweisungen sowie Piktogrammen bedruckt und können im RDG thermisch aufbereitet werden.

Vliestuchrolle, weiß, 100 % PET, für Desinfektion und Reinigung, reißfest, saugstark, fusselarm und einzelverpackt

**Multitex® Wipes Standard, fein gelocht**  
100 Abrisse à ca. 30 x 32 cm, VE = 6 Rollen · Art. 11839-00

**Multitex® Wipes Premium, glatt**  
60 Abrisse à ca. 30 x 32 cm, VE = 8 Rollen · Art. 11830-02  
100 Abrisse à ca. 30 x 32 cm, VE = 6 Rollen · Art. 11840-00  
110 Abrisse à ca. 24 x 32 cm, VE = 6 Rollen · Art. 11843-00  
100 Abrisse à ca. 18 x 38 cm, VE = 6 Rollen · Art. 11842-00

**Wiper Bowl® Safe & Clean Spendersysteme**  
aus Kunststoff, wiederverschließ- und -verwendbar  
**eckig**, passend für Art. 11830-02, 11839-00, 11840-00, 11843-00,  
Höhe ca. 20 cm, VE = 1 Eimer · Art. 60995-00  
**rund**, passend für Art. 11830-02, 11839-00, 11840-00, 11842-00, 11843-00,  
Höhe ca. 21 cm, ca. 21 cm Ø, VE = 1 Eimer  
· Art. 60997-00

**Wandhalterung mit Schloss**  
für Spendersysteme Art. 60997-00 · Art. 60092-01



Bitte beachten Sie auch unser Einmal-Tuchspendersystem!



[www.zvg-troisdorf.de](http://www.zvg-troisdorf.de)

**ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG**

**Zentrale**  
Urbacher Straße 4+5  
D-53842 Troisdorf  
Tel.: +49 (0)2241 484-0  
Fax: +49 (0)2241 484-29  
info@zvg-troisdorf.de

**Niederlassung Sachsen**  
Gewerbering Nord 24  
D-01900 Großröhrsdorf/OT Bretinig  
Tel.: +49 (0)35955 831-0  
Fax: +49 (0)35955 447-17  
sachsen@zvg-gmbh.de

**Niederlassung Süd**  
Gröninger Weg 7  
D-74379 Ingersheim  
Tel.: +49 (0)7142 9123-0  
Fax: +49 (0)7142 9123-28  
info@zvg-gmbh.de