

# Wiper Bowl® Safe & Clean

Arbeitsvorbereitung für Feuchttuchspendersysteme



Art. 60997-00

Art. 60995-00

Art. 60998-00

Deckel komplett abnehmen.  
**Multitex® Wipes** Rolle in den  
Mehrwegeimer einsetzen.

nach Aufbereitung  
wiederverwendbar

Deckel komplett abnehmen.  
**Multitex® Wipes** Rolle wird  
im Einmaleimer mitgeliefert.

nur zum  
Einmalgebrauch

Zur Tränkung der Tuchrolle mit der gewünschten  
Desinfektions- oder Reinigungslösung (ca. 2-3 l  
je nach Rollengröße) langsam spiralförmig  
von der Mitte nach außen befüllen.


Das mitgelieferte Chargenetikett  
beschriften und auf  
den Verschlussdeckel  
oder Eimer kleben.

Das auf den Eimer  
gedruckte  
Chargenetikett  
beschriften.



**Multitex® Wipes** aus der Mitte der Rolle  
durch die Deckelöffnung ziehen  
und Schutzdeckel fest schließen.

Nach 20-30 Minuten Einwirkzeit  
ist der **Wiper Bowl® Safe & Clean** nun  
- abhängig vom verwendeten Desinfektionsmittel - bis zu  
**4 Wochen (28 Tage)** bzw. **6 Wochen (42 Tage)**  
einsatzbereit.

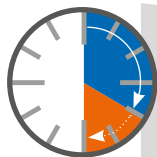

Es ist darauf zu achten, dass der Deckel  
immer fest verschlossen ist!

Wiederaufbereitung  
siehe Rückseite!

Entsorgen Sie die Flüssigkeit  
und eventuell die Restrolle  
auf vorgeschriebene Weise.

Nicht zur  
Wiederaufbereitung  
geeignet!

Der Eimer inklusive Deckel  
ist nach der Anwendung  
fachgerecht zu entsorgen.



zetDress® zetMask® zetPutz® zetSorb® zetForm® zetRoll® zetGigant® zetClean® zetMedica® zetMatic® zetZubehör

## Wiederbefüllung des bedruckten Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimers:

### Manuelle Aufbereitung:

- Den Spendereimer und Deckel mit heißem Trinkwasser gründlich aus- bzw. abspülen und anschließend abtrocknen.
- Anschließend erfolgt eine Wischdesinfektion des Spender und Deckels mit einem geeignetem Flächen-desinfektionsmittel. Vor der Wiederbefüllung lassen Sie den Spendereimer und den Deckel nach der Desinfektion trocknen.

### Maschinelle Aufbereitung:

- Der bedruckte Spendereimer kann im RDG thermisch aufbereitet werden.

Verfahren Sie gemäß der Schritte auf der Vorderseite.



## Maximale Sicherheit bei der täglichen Flächendesinfektion

Die hochwertigen **Multitex® Wipes** aus **100 % PET** gewährleisten eine optimale Wirkstoffabgabe an die zu desinfizierende Fläche – in Kombination mit allen handelsüblichen gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln sowie der angefertigten Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentrationen.

Die Kompatibilität mit den nachfolgend genannten Desinfektionsmitteln ist in Anlehnung an die **Standardmethoden des DGHM 2001** sowie der **Prüfmethode EN 16615 des 4-Felder Testes** gemäß VAH-Vorgaben getestet worden.

Im Rahmen dieser Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die getesteten VAH-gelisteten Gebrauchslösungen der Produkte Antifect Extra, Incidin Extra N, Incidin Rapid, Kohrsolin FF und Pursept AF bei einer **Standzeit von 4 Wochen (28 Tage)** geeignet sind.

Auch bei den VAH-gelisteten Gebrauchslösungen Biguanid Fläche N, Incidin Plus, Incidin Pro, Optisal Plus und Terralin Protect konnte bei den Untersuchungen bei einer erweiterten **Standzeit von 6 Wochen (42 Tage)** die Eignung festgestellt werden.

**Multitex® Wipes** aus 100 % PET erhalten Sie:

- als **Multitex® Wipes** lose gefaltete Tücher
- im **Wiper Bowl® Safe & Clean** Tuchspendersystem **wiederverwendbar/zur Aufbereitung**
- im **Wiper Bowl® Safe & Clean Einmal-Tuchspendersystem für den Hochrisikobereich**



[www.zvg-troisdorf.de](http://www.zvg-troisdorf.de)

### ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG

**Zentrale**  
Urbacher Straße 4+5  
D-53842 Troisdorf  
Tel.: +49 (0)2241 484-0  
Fax: +49 (0)2241 484-29  
info@zvg-troisdorf.de

**Niederlassung Sachsen**  
Gewerbering Nord 24  
D-01900 Großröhrsdorf/OT Bretnig  
Tel.: +49 (0)35955 831-0  
Fax: +49 (0)35955 447-17  
sachsen@zvg-gmbh.de

**Niederlassung Süd**  
Gröninger Weg 7  
D-74379 Ingersheim  
Tel.: +49 (0)7142 9123-0  
Fax: +49 (0)7142 9123-28  
info@zvg-gmbh.de